

Hướng Dẫn Tiêm

1



Sát Trùng

Sát trùng phần cao su bằng khăn lau tẩm cồn

2



Lắp kim tiêm

Tháo bỏ nắp nhựa. Xé bỏ niêm phong trên kim


8



Tái chế kim tiêm

Đóng nắp kim tiêm. Tháo kim bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Vứt bỏ trong thùng rác y tế

7

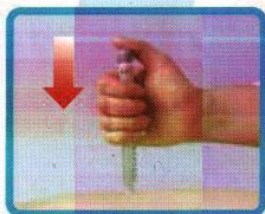

Cắm vuông góc kim vào da. Ấn nút tiêm hết cỡ cho đến khi chạm đến vạch chia độ 0. **Giữ yên 10 giây trước khi rút kim**

3




Lắp kim tiêm thẳng đứng và siết chặt

4



Xoay mặt số đo liều sang số 2

5

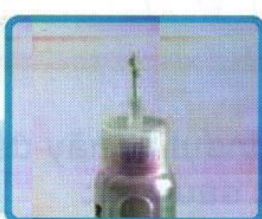

Tháo nắp trong và nắp ngoài khỏi kim. Cầm kim thẳng đứng. Nhẹ nhàng gõ bút tiêm để bọt khí nổi lên trên. Ấn mặt số hết cỡ để đẩy dung dịch tiêm lên

6



Xoay mặt số đo liều đến liều dùng mong muốn (ví dụ: 15 đơn vị)

SĐT Tư Vấn: 0800-395168

TW.GLA.15.07.02

越南


SANOVI

Hướng Dẫn Sử Dụng Bút Tiêm Insulin



Hình ảnh so sánh bút tiêm insulin với cây bút

Vị Trí Tiêm

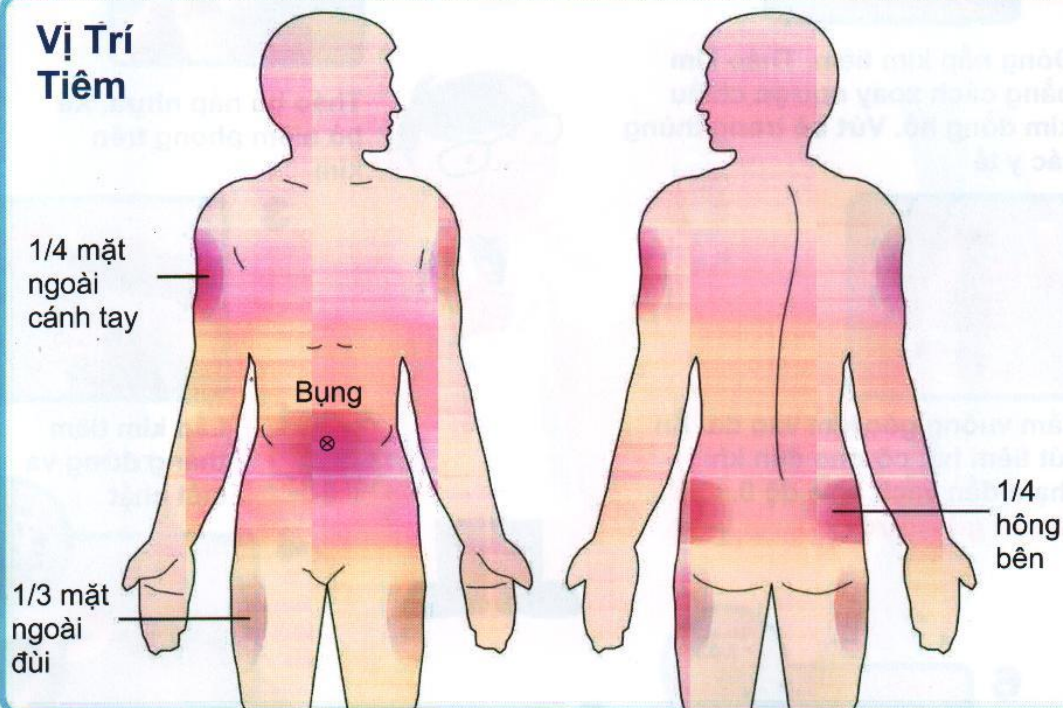

Trước khi tiêm insulin, hãy đảm bảo hoàn thành các bước sau đây:

- * Chuẩn bị thiết bị: Khăn lau tẩm cồn, bút tiêm insulin.
- * Xác định vị trí tiêm (nếu cần tiêm 3 đến 4 lần mỗi ngày, hãy thay đổi luân phiên vị trí tiêm. Tránh tiêm lặp lại ở cùng một vị trí).
- * Sát trùng vị trí tiêm đúng cách.



Tài liệu giáo dục sức khỏe này chỉ được cung cấp làm tài liệu tham khảo cho các bệnh nhân được chỉ định dùng insulin. Tài liệu giáo dục sức khỏe này phải được cung cấp bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Không sử dụng tài liệu này để thay thế cho chăm sóc y tế chuyên môn. Nếu bạn có câu hỏi về y tế, vui lòng tham khảo chuyên gia y tế của quý vị.