

Petunjuk Injeksi

1



Sterilkan karet dengan tisu alkohol

2



Pasang jarum

Lepas penutup plastiknya. Lepas segel pada jarum

8



Daur ulang jarum

Pasang kembali penutup jarum. Lepas jarum dengan memutarkannya ke kiri. Buang di tempat sampah daur ulang medis

7



Masukkan jarum ke dalam kulit secara vertikal. Tekan tombol injeksi sampai pelepasannya kembali ke 0. **Tahan selama 10 detik sebelum melepaskan jarum**




3



Pasang jarum secara vertikal, kemudian kencangkan

4

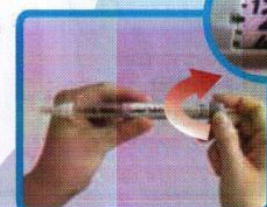


Putar tombol dosis ke 2

6




Putar tombol dosis ke angka yang diinginkan (misalnya: 15 unit)


5

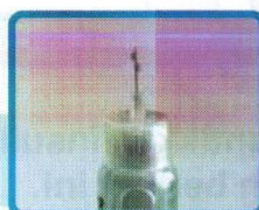

Lepas penutup dalam dan luar dari jarum. Tahan jarum dalam posisi tegak. Ketuk perlahan pen injeksi agar gelembung udara naik ke ujung. Tekan tombol sepenuhnya untuk mengeluarkan larutan injeksi

Untuk konsultasi lebih lanjut silahkan hubungi : 0800-395168

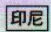TW.GLA.15.08.10 


SANOFI 

Petunjuk Penggunaan Pen Injeksi Insulin



Skema Skala Pen Injeksi Insulin

Lokasi Injeksi

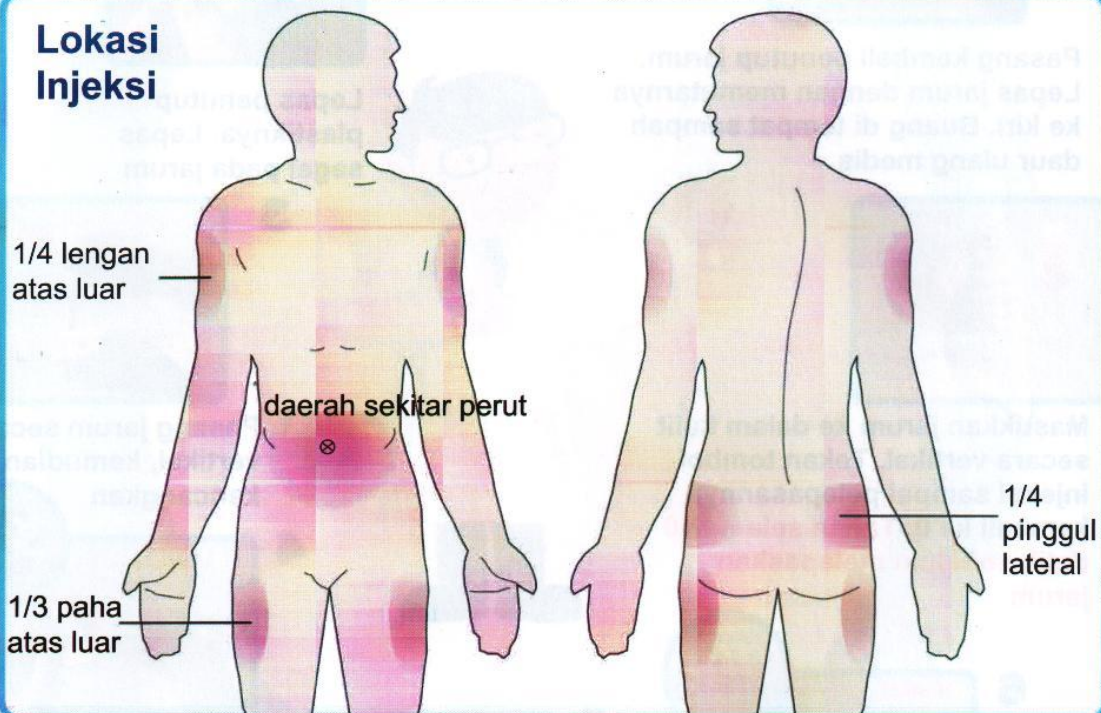

Sebelum menyuntikkan insulin, lakukan langkah-langkah berikut ini.

- * Persiapkan alat: Tisu basah beralkohol, pen insulin.
- * Tentukan lokasi injeksi (Jika 3-4 injeksi diperlukan setiap hari, lakukan rotasi lokasi injeksi. Hindari injeksi berulang di lokasi yang sama).
- * Lakukan sterilisasi di lokasi injeksi dengan benar.



Materi pendidikan kesehatan ini hanya disediakan sebagai rujukan bagi pasien yang diberi resep insulin. Materi pendidikan kesehatan harus disediakan oleh ahli perawatan kesehatan. Materi edukasi ini tidak menggantikan perawatan dari profesi medis diberikan oleh praktisi medis. Jika ada pertanyaan menyangkut kesehatan, silakan hubungi Dokter Anda.